

Adam+ Trippelstoel

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Bedankt!	5
Algemeen.....	5
Leest u deze handleiding aandachtig	6
Voorgenomen gebruik.....	7
Beoordeling gebruiker.....	7
Levensduur voorziening	7
Veiligheidsinstructies	8
Vorbereidingen.....	9
Eerste gebruik.....	9
Voor elk gebruik	9
Beschrijving geleverde onderdelen in de verpakking	10
Functiebeschrijving.....	12
De mechanische Hoog/Laag basis instelling.....	12
Elektrische Hoog/Laag verstelling	12
Hoekverstelling rugleuning:	13
Hoogteverstelling rugleuning:	13
Breedte verstelling armleggers:	13
Hoogteverstelling armleggers:	13
Wegklappen armleggers.....	14
In- en uitstappen van uw Adam Trippelstoel	14
Schoonmaak- en Desinfectie instructies	15
Stappenplan schoonmaken en desinfecteren Adam trippelstoel.....	16
Fase 1 – Verwijderen visuele verontreiniging	16
Fase 2 – Gebruik van allesreiniger.....	16
Fase 3 – Gebruik van desinfectiemiddel.....	16
Fase 4 – Opruimen.....	16
Instructies hoe om te gaan met de accu's.....	17
WAARSCHUWING	17
Opslag.....	17
Opladen van de Adam	18

Einde levensduur	18
Preventief onderhoudsschema (POS)	19
Jaarlijkse inspectie	20
Te ontraden gebruik	21
Probleem oplossen	21
Technische specificaties	22
Algemeen.....	22
Gebruik, Transport & Opslag.....	22
Recycling.....	22
Afmetingen & Verstelbereik.....	23
Labels.....	24
Type nr. label	24
Labels bedieningen:.....	24
Onderdelen & Accessoires	25
Opmerkingen/ aantekeningen:	26
Conformiteitsverklaring.....	27

Voorwoord

Bedankt!

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u voor MSP Medical Products heeft gekozen! Wij feliciteren u met de aanschaf/verstrekking van uw Adam+ trippelstoel en wensen u vele jaren gebruikersgemak en goede gezondheid toe.

U zult merken dat de Adam+ vele mogelijkheden biedt, om u gezond en comfortabel te laten zitten en bewegen.

Het is zeer aan te bevelen deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen om u zelf vertrouwd te maken met de vele mogelijkheden die deze stoel u biedt.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw verstrekker/dealer of rechtstreeks met ons en we staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Team MSP

Algemeen

MSP adviseert te allen tijde originele reserveonderdelen via medicalspareparts.com te bestellen, deze zijn speciaal voor uw Trippelstoel Adam+ ontworpen en geproduceerd. Hiermee vermindert u het risico op gevaren en verwondingen door het gebruiken van niet originele onderdelen.

MSP ontwikkeld en verbetert haar producten continu. Als gevolg daarvan behouden wij ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder verdere berichtgeving.

Indien de volgende termen in deze handleiding gebruikt worden is de betekenis als volgt:

-  **WAARSCHUWING:**
Indien de waarschuwing niet opgevolgd wordt kan dit resulteren in verwondingen aan uzelf en anderen.
-  **LET OP:**
Indien de instructies niet opgevolgd worden kan dit leiden tot beschadiging van de gehele stoel of onderdelen daarvan.
-  **OPMERKING:**
Deze opmerking is belangrijk voor het correct functioneren van de stoel.

Leest u deze handleiding aandachtig

Wij vragen u deze gebruikershandleiding aandachtig en grondig door te lezen alvorens de Trippelstoel Adam+ in gebruik te nemen. De informatie in deze handleiding is essentieel voor een goede werking en correct onderhoud van uw stoel, evenals het voorkomen van mogelijke verwondingen door verkeerd gebruik.

Niet-originele aanpassingen kunnen de veiligheid van uw stoel aantasten.

Medical Spare Parts B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, incidenten of verminderde levensduur als gevolg hiervan.

Voorgenomen gebruik

Het gebruik van de trippelstoel Adam+ moet in lijn zijn met het voorgenomen gebruik en de veiligheidsinstructies. Als er onduidelijkheden zijn vragen wij u contact met ons of uw dealer/verstrekker op te nemen.

Deze voorziening is ontworpen om dienst te doen als trippel/werk stoel en is bedoeld als hulpmiddel in voornamelijk particuliere sfeer. Deze stoel heeft als doel het leven van de gebruiker eenvoudiger te maken dankzij de hoog/laag functionaliteit, lage rolweerstand van de wielen en ergonomisch design.

Beoordeling gebruiker

Deze voorziening is bedoeld voor gebruikers die voldoen aan de volgende aanbevelingen:

-  Het gewicht van de gebruiker is niet hoger dan 300kg
-  De lengte van de gebruiker is ten minste 120cm
-  De gebruiker heeft voldoende functionaliteit in de voeten/benen om zich zelfstandig te verplaatsen.

Levensduur voorziening

De levensduur van deze voorziening is tenminste tien (10) jaar, maar afhankelijk van de gebruiksintensiteit en laadintervallen, kan de levensduur van accupack en wielen korter zijn.

Deze levensduur is berekend met inachtneming dat het preventief onderhoud wordt uitgevoerd zoals beschreven in deze handleiding.

Afhankelijk van de slijtage kan het zo zijn dat sommige onderdelen zoals accu's en wielen alsmede sommige stoffeerdelen vervangen moeten worden tijdens de levensduur van deze voorziening.

Veiligheidsinstructies

Hieronder volgen een aantal essentiële instructies voor een veilig gebruik van uw voorziening.

WAARSCHUWING

Zorgt u er bij het in- en uitstappen van uw stoel voor, dat deze te allen tijde op de rem staat. Dit voorkomt eventuele verwondingen.

WAARSCHUWING

Wanneer u in de stoel zit en u wilt zich verplaatsen, zorgt u er dan voor dat de armleggers omhoog en gefixeerd zijn.

WAARSCHUWING

Zet de stoel nooit op de rem op een hellend vlak en leun achterover. U loopt anders het risico dat de stoel achterovervalt.

LET OP

Deze voorziening is voor binnenshuis gebruik. Wanneer u deze voorziening buitenshuis gebruikt bestaat de kans op permanente schade aan wielen en de elektrische componenten.

LET OP

Gebruik nooit scherpe objecten in de buurt van uw voorziening. Dit kan leiden tot schade.

LET OP

Verricht nooit werkzaamheden aan de trippelstoel Adam+, als u daarvoor niet de benodigde kennis of bevoegdheid heeft.

Vorbereidingen

Neemt u onderstaande voorbereidingen in acht bij het gebruiken van uw voorziening.

Eerste gebruik

1. Doe een visuele inspectie om te kijken of er geen transportschade is aan uw Adam
2. De verpakking dient afgevoerd te worden volgens de geldende regelgeving
3. Controleer of alle onderdelen geleverd zijn. U kunt dit vergelijken met de “Beschrijving onderdelen” lijst in deze gebruikershandleiding
4. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding
5. Pak de acculader uit en leg deze op een voor u makkelijk te onthouden plaats
6. Laad uw Adam+ gedurende minimaal 8 uur op
7. Test of alle functies werken zoals uitgelegd in het Preventief Onderhoudsschema (POS)
8. Bewaar deze gebruikershandleiding op een voor u makkelijk te onthouden plaats

Voor elk gebruik

1. Controleer de wielen en de parkeerrem

OPMERKING


Indien u vragen heeft of onzeker bent over het gebruik van de Adam+, neemt u dan contact op met uw dealer/verstrekker of met ons.

Beschrijving geleverde onderdelen in de verpakking

De Adam+ verpakking bevat de volgende onderdelen:

-  Adam+ trippelstoel
-  Acculader
-  Mapje met documenten

In deze *exploded view* kunt u de onderdelen identificeren:

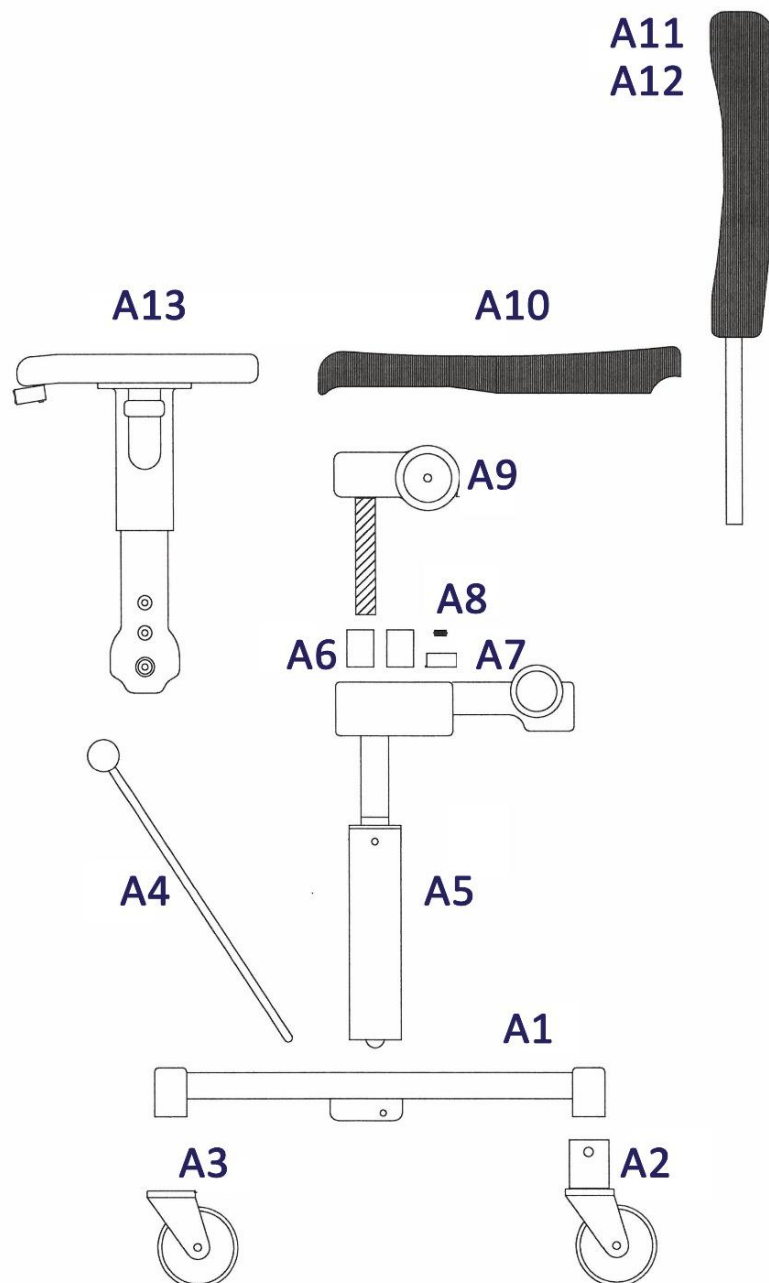

Item	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Opmerkingen
A1	MSP-MT-MP-00800	Hoofdframe	1	
A2	MSP-WH-MP-00120	Zwenkwiel ongeremd	2	Ø 150mm
A3	MSP-WH-MP-00130	Zwenkwiel geremd	2	Ø 150mm, centraal geremd
A4	MSP-MT-MP-00810	Remhendel	1	Inclusief kogelknop
A5	MSP-MT-MP-00850	Hefkolom	1	Complete samenstelling
A6	MSP-A-MP-00800	Accu	2	
A7	MSP-EK-MP-00800	Electronica box	1	
A8	MSP-OV-MP-00100	Vermogensweerstand	1	Motor beveiliging
A9	MSP-MO-MP-00800	Hoog/laag aandrijving	2	Complete samenstelling
A10	MSP-PD-MP-0080X	Zitting	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A11	MSP-PD-MP-0081X	Rugleuning	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A13	MSP-KIT-MP-00100	Armleuning	2	Complete samenstelling

Functiebeschrijving

De mechanische Hoog/Laag basis instelling

Deze instelling is enkel voorzien om de Adam+ aan uw lichaamslengte aan te passen en dient door uw dealer/verstrekker bij het eerste gebruik ingesteld te worden.

1. Draai de Bout M10 (SW 17) los.
2. Verstel de kolom op de gewenste hoogte.
3. Let op dat de zitting recht op het onderstel blijft.
4. Draai de bout weer vast met aanhaalmoment Max. 90NM.



Elektrische Hoog/Laag verstelling

De Adam+ is elektrisch in hoogte verstelbaar.

Dit doet u door de bediening die onder de armlegger zit te gebruiken.

Als u de knop in de richting van het pijltje omhoog drukt beweegt de stoel zich naar boven.

Als u de knop in de richting van het pijltje omlaag drukt beweegt de stoel zich naar beneden.

In overleg met uw dealer/verstrekker is deze bediening links of rechts te plaatsen.

Optioneel is de Adam+ ook met extra losse handbediening verkrijgbaar. (Zie afb.)



Bediening parkeerrem


Op de stoel is een hendel aangebracht om de parkeer rem te bedienen. Als de hendel naar voren staat is de stoel vrij te verrijden. Wanneer de hendel naar achteren staat, worden de achterwielen volledig geblokkeerd en kunt u veilig in- en uitstappen

In overleg met uw dealer/verstrekker is deze hendel links of rechts te plaatsen.



Hoekverstelling rugleuning:

-  Druk de hendel onder aan de rugleuning naar beneden
-  Breng de rugleuning in de juiste stand en zet de hendel weer naar boven
-  De rugleuning wordt nu vergrendeld in de nieuwe stand

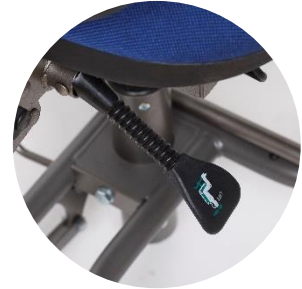

Hoogteverstelling rugleuning:

-  Draai de ronde knop tegen de klok in los.
-  Schuif de rug op de gewenste hoogte.
-  Draai vervolgens de ronde knop met de klok mee vast.



Breedte verstelling armleggers:

De armleggers kunnen in de breedte worden versteld door de inbusbouten aan de onderzijde van de zitting los te draaien.

Hierna kunt u de breedte aanpassen.

Als de gewenste breedte is bereikt dient u de inbusbouten weer vast te draaien.



Hoogteverstelling armleggers:

De armleggers kunnen in hoogte worden versteld door de handgreep aan de zijkant omhoog te trekken.

Stel daarna de armleggers op de gewenste hoogte in en laat de handgreep los.



Wegklappen armleggers

De armleggers van de Adam kunnen ook weg geklapt worden om een eenvoudige zijdelingse transfer te maken. Trek hiervoor de armlegger in zijn geheel omhoog en klap deze naar achteren weg



In- en uitstappen van uw Adam+ Trippelstoel

Zorgt u ervoor dat de parkeerrem te allen tijde geactiveerd is voordat u in- of uitstapt in uw trippelstoel zoals beschreven op pagina 12 van deze handleiding.

Als u vanuit het bed of een bank op de trippelstoel wilt plaatsnemen kunt u de armleuningen naar achteren wegklappen voor een zijdelingse transfer. Het wegklappen van de armleuningen staat beschreven op de vorige pagina.

Na het plaatsnemen kunt u de armleuning weer terugplaatsen. Deze valt automatisch terug in de vergrendelde positie.

Schoonmaak- en Desinfectie instructies

Gebruikt u voor het beste resultaat uitsluitend “MSP Medical Chemicals en MSP Medical disposables” producten.

Wij adviseren de volgende producten voor uw Adam trippelstoel:

-  MSP Medical Chemicals Allesreiniger (MC-AR-001)
-  MSP Medical Chemicals Desinfectiemiddel (MC-DI-001)



Wij adviseren de volgende schoonmaak accessoires voor uw Adam trippelstoel:

-  MSP Medical Disposables Handschoenen (MD-HA-LX-001)
-  MSP Medical Disposables Bril (MD-EY-CL-001)
-  MSP Medical Disposables Spray Bottle (MD-GN-BT-001)
-  MSP Medical Disposables Schoenmaakdoek (MD-GN-TW-001)
-  MSP Medical Disposables Handdoeken (MD-GN-TW-002)
-  MSP Medical Disposables Korte zachte borstel (MD-GN-BR-001)
-  MSP Medical Disposables Lange zachte borstel (MD-GN-BR-002)



Indien u vragen heeft over onderstaande procedure of indien u de producten / accessoires wenst te bestellen, neem dan contact op met onze klantenservice.

WAARSCHUWING

Om oog- en huidschade te voorkomen, draag te allen tijde handschoenen en een veiligheidsbril. Indien er contact wordt gemaakt ruim spoelen met water. Mocht er irritatie ontstaan aan de huid of ogen, neem dan contact op met een dokter.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing en Material Safety Data Sheet (MSDS) van het desinfectiemiddel.

WAARSCHUWING

Om contaminatie te voorkomen, volg te allen tijde de stappen in deze gebruikshandleiding.

LET OP

Om schade aan uw Adam+ trippelstoel te voorkomen, gebruik uitsluitend MSP Medical Chemicals producten.

Stappenplan schoonmaken en desinfecteren Adam+ trippelstoel.

Uw Adam+ Trippelstoel is eenvoudig te onderhouden middels dit stappenplan. Wanneer u deze procedure nauwgezet volgt zal de stoel altijd in optimale hygiënische staat verkeren.

Fase 1 – Verwijderen visuele verontreiniging

-  Trek handschoenen aan alvorens te beginnen
-  Maak de Adam vrij van stof en vuilresten door een sprayflacon met water te vullen en de bekleding en frame in te sprayen. Neem vervolgens een zachte borstel en verwijder de vuilresten. Maak droog met een schoonmaakdoek
-  Controleer of er vuilresten rondom de wielen zitten (zoals haren of opgehoopt stof) en verwijder deze met de hand

Fase 2 – Gebruik van allesreiniger

-  Zet nu ook de veiligheidsbril op
-  Neem de MSP Medical Chemicals allesreiniger in sprayflacon en spray de stoel helemaal in, met uitzondering van de bekleding
-  Gebruik de (lange) zachte borstel en borstel de gehele stoel grondig. Eventueel kan ook een schoonmaakdoek gebruikt worden
-  Neem een nieuwe schoonmaakdoek en maak deze vochtig met water. Verwijder de schoonmaakresten. Optioneel kan een sprayflacon met water en droge doek gebruikt worden om de resten te verwijderen
-  Herhaal bovenstaande stap totdat de stoel vrij is van schoonmaakresten. De doek moet geregeld gespoeld worden in water.

Fase 3 – Gebruik van desinfectiemiddel

-  Neem de MSP Medical Chemicals desinfectiemiddel in sprayflacon en spray de stoel helemaal in, met uitzondering van de bekleding
-  Gebruik de (lange) zachte borstel en borstel de gehele stoel grondig. Eventueel kan ook een schoonmaakdoek gebruikt worden
-  Neem een nieuwe schoonmaakdoek en maak deze vochtig met water. Verwijder de desinfectieresten. Optioneel kan een sprayflacon met water en droge doek gebruikt worden om de resten te verwijderen
-  Herhaal bovenstaande stap totdat de stoel vrij is van desinfectieresten. De doek moet geregeld gespoeld worden in water.
-  Laat nu de gehele stoel drogen.

Fase 4 – Opruimen

-  Uw Adam+ trippelstoel is weer klaar voor gebruik. Alle gebruikte materialen dienen te worden afgevoerd/hergebruikt volgens de geldende recyclenormen

Instructies hoe om te gaan met de accu's

WAARSCHUWING

Om verwondingen te vermijden moet u te allen tijde de accu NIET

- Verbrijzelen
- Lek prikken
- Openen
- Ontmantelen

Indien de behuizing van de accu opengaat en de inhoud in contact komt met uw huid en/of kleren, spoel dan onmiddellijk royaal met water.

Indien de inhoud van het accupakket in aanraking komt met uw ogen, spoel onmiddellijk royaal met water en zoek medische hulp

Inhalering van de inhoud kan leiden tot irritatie van de luchtwegen. Zoek frisse lucht en medische hulp

OPMERKING

Ter preventie van oververhitting en explosiegevaar, stel het accupakket NIET bloot aan vuur of buitenproportionele warmtebronnen.

Opslag

Indien u uw Adam+ Trippelstoel voor langere periode niet gebruikt, neemt u dan onderstaande mee in acht:

-  De accu's zullen zichzelf langzaam ontladen indien deze niet gebruikt wordt. Wij adviseren om minimaal elke 6 maanden de accu's op te laden met de meegeleverde oplader om de levensduur te verlengen
-  Als de Adam trippelstoel niet in gebruik is dan moet de omgevingstemperatuur liggen tussen 0°C en +30°C
-  Voor maximale prestaties, stel niet accu's niet bloot aan temperaturen hoger dan +50°C

Opladen van de Adam+

Controleer voor gebruik de acculader op beschadigingen.

Laad uw Adam+ alleen op met de meegeleverde acculader (MSP-C-MP-00100). Het gebruik van een niet-originele lader kan lijden tot een verkorte levensduur van uw accu's en/of beschadigingen aan de elektronica.

De meegeleverde acculader regelt zichzelf volledig automatisch en zorgt altijd voor de meest ideale laadcyclus. Het correcte stappenplan voor het opladen van uw stoel leest u hieronder:

-  Verbind de lader eerst met het lichtnet door deze in het stopcontact te steken.
-  Plug daarna het laadsnoer in de laadaansluiting onder de armlegger (fig. 1). De indicatie LED zal nu rood kleuren.



Fig. 1

-  Wanneer het laden voltooid is, zal de indicatie LED op de acculader groen kleuren. U kunt nu het laadsnoer verwijderen uit de laadaansluiting en de acculader loskoppelen van het lichtnet. Bergt u de acculader weer op, op een voor u makkelijk te onthouden plaats.

De Adam+ kan met een vol accupakket circa 25 maal volledig omhoog en omlaag met een gemiddeld gebruikersgewicht. Mochten de accu's te leeg raken dan schakelt de elektronica automatisch af en dient u de stoel op te laden volgens bovenstaande procedure.

De accu's zijn op basis van SLA-technologie en daarmee gas- en vloeistofdicht. Hierdoor kan op elke locatie geladen worden en zijn er geen speciale voorschriften vereist.

In de praktijk is het zinvol om bij dagelijks gebruik de stoel elke avond op te laden.

Indien u de stoel langere tijd buiten gebruik stelt, dient u de schakelaar aan de achterzijde op 0 te zetten of de lader aangesloten te laten. De lader zal dan dienstdoen als druppellader en houdt de accu's in goede conditie. Dit voorkomt schade aan het accupakket.

Voor een maximale levensduur raden wij u aan het accupakket met regelmatige intervallen op te laden. Bijvoorbeeld iedere avond of iedere twee dagen, naar gelang de intensiteit waarmee u de voorziening gebruikt.

Einde levensduur

Als u merkt dat de Adam+ steeds korter gebruikt kan worden, dan zijn de accu's aan vervanging toe. Neemt u contact op met uw dealer/verstrekker of met ons voor een nieuw accupakket.

De oude accu's dienen volgens de geldende regelgeving afgevoerd te worden of kunnen naar ons geretourneerd worden.

Preventief onderhoudsschema (POS)

Uw Adam+ trippelstoel ontkomt helaas niet aan slijtage. Als u onderstaande punten binnen de aangeduide intervallen uitvoert, kunt u deze slijtage tot een minimum beperken en de levensduur optimaal benutten.

Actiepunt	Voor elk gebruik	Elke maand	Elke 6 maanden	Elke 12 maanden
Controle remwerking	X			
Controle wielen	X			
Controle hoog/laag functie		X		
Controle lader en accu			X	
Controle frame			X	
Controle bekleding			X	
Reiniging frame en wielen		X		

WAARSCHUWING

Om verwondingen te komen, maak nooit modificaties aan uw voorziening en gebruik geen niet-compatibele onderdelen.

WAARSCHUWING

Verricht nooit werkzaamheden aan de Adam trippelstoel wanneer u niet over de vereiste kennis en bevoegdheden beschikt.

Jaarlijkse inspectie

Buiten het preventieve onderhoud is voor een goede en veilige werking van de Adam+ trippelstoel een jaarlijkse inspectie noodzakelijk.

Deze dient uitgevoerd te worden door de technische dienst van MSP of uw dealer/verstrekker.

Deze inspectie dient minimaal de volgende controles te omvatten:

Op mechanisch vlak:

-  Controle van het frame en hefmechanisme op (haar)scheur indicaties
-  Controle van alle las- en boutverbindingen
-  Controle op rechtheid
-  Controle op andere schade door slijtage of impact van buiten
-  Controle van de aandrijving en wielen
-  Controle van alle spelingen en afstellingen
-  Controle van de hoog/laag spindel en spindelmoer.

Op elektrisch vlak:

-  Controle van de bedrading op kabelbreuken
-  Controle van alle stekkerverbindingen
-  Controle van de elektrische (veiligheids-)functies
-  Controle van de software van de besturing
-  Controle van de accu's op capaciteit
-  Controle van de acculader

Tot slot dient een aardings- / isolatie-test aan het accupakket en de accu lader te worden uitgevoerd!

Te ontraden gebruik

-  Gebruik de Adam+ trippelstoel niet voor transport van dieren of goederen.
-  Gebruik de Adam+ trippelstoel niet als trek/hijs - of duw-hulpmiddel, voor welke toepassing dan ook.
-  Gebruik de Adam+ trippelstoel niet als er een defect is of een vermoeden van een defect.
-  De Adam+ trippelstoel is voorzien van een erg krachtig hefsysteem, laat kinderen daarom niet spelen met de trippelstoel.

Probleem oplossen

Hieronder vindt u problemen die mogelijk voor kunnen komen en de bijbehorende oplossing daarvoor.

Omschrijving probleem	Oorzaak	Oplossing
Adam rijdt zwaar/stroef	De parkeerrem is actief	De parkeer rem deactiveren
Adam reageert niet op bediening	Beveiliging actief	Bediening loslaten 2 sec. wachten en opnieuw proberen.
Adam reageert niet op bediening	Accu is leeg	Accu opladen.
Adam gaat alleen omlaag	Accu is bijna leeg	Accu opladen.

Technische specificaties

Algemeen

Maximaal totaalgewicht	350 Kg
Maximaal patiënt gewicht	300 Kg
Gewicht van Adam	50 Kg
Model en Type	Adam+ Trippelstoel MP-ADP-SD-00100
IP klasse	IP 40
Accu artikelnummer	MSP-A-MP-0120
Accu technologie	Gesloten lood zuur technologie
Accucapaciteit	4000MA/h
Accuspanning	12 V/DC
Acculader artikelnummer	MSP-C-MP-00200
Maximale inschakelduur	10 % 2 min. AAN / 18 min. UIT
Maximale geluidsdruk	60 dB Max.

Gebruik, Transport & Opslag

Temperatuur	+10°C tot +40°C in gebruik -20°C tot +70°C tijdens transport -20°C tot +70°C bij opslag
Luchtvochtigheid	15-95% bij +20°C in gebruik 10-80% bij +20°C tijdens transport 10-80% bij +20°C bij opslag
Luchtdruk	800hPa tot 1060hPa in gebruik 500hPa tot 1100hPa tijdens transport 500hPa tot 1100hPa bij opslag

Recycling

Deze trippelstoel dient te worden gerecycled volgens nationale regelgeving

Accu	Sealed Lead Acid Valve Regulated (SLA/VRLA) Niet weggooien, enkel recyclen
Verpakking	Karton, recyclebaar
Adam+ trippelstoel	Elektrische, metalen en plastic onderdelen moeten worden gescheiden en gerecycled worden volgens nationale regelgeving

Afmetingen & Verstelbereik

Zithoogte	Minimaal 42cm Maximaal 74cm
Elektrische hoogtevastelling	200mm
Mechanische hoogtevastelling	120mm
Zitdiepte	46cm
Zitbreedte	46cm
Rughoogte	50cm
Rughoekvastelling	75-120°
Wieldiameter	150mm optioneel 125/100mm
Hoogtevastelling armleggers	17-25cm, gemeten vanaf de zitting. Weg klappen mogelijk voor zijdelingse transfer
Lengtevastelling armleggers	n.v.t.
Breedte tussen de armleggers	38-65cm
Maximaal gebruikersgewicht	300Kg.



*Adam+ in laagste en hoogste stand
Getoonde frame is van normale Adam*

Labels

Type nr. label

Gebruik het serienummer als u contact opneemt met onze technische dienst of bij het bestellen van onderdelen.



Labels bedieningen:

Label handbediening en laad aansluiting.



Onderdelen & Accessoires

Item	Artikelnummer	Omschrijving	Vanaf s/n	Tot s/n	Aantal	Opmerkingen
A1	MSP-MT-MP-00800	Hoofdframe	Alle	Alle	1	
A2	MSP-WH-MP-00120	Zwenkwiel ongeremd	Alle	Alle	2	Ø 150mm
A3	MSP-WH-MP-00130	Zwenkwiel geremd	Alle	Alle	2	Ø 150mm, centraal geremd
A4	MSP-MT-MP-00810	Remhandle	Alle	Alle	1	Inclusief kogelknop
A5	MSP-MT-MP-00850	Hefkolom	Alle	Alle	2	Complete samenstelling
A6	MSP-A-MP-00800	Accu	Alle	Alle	2	
A7	MSP-EK-MP-00800	Electronica box	Alle	Alle	1	
A8	MSP-EK-MP-00810	Vermogensweerstand	Alle	Alle	1	Motor beveiliging
A9	MSP-MO-MP-00800	Hoog/laag aandrijving	Alle	Alle	2	Complete samenstelling
A10	MSP-PD-MP-0080X	Zitting	Alle	Alle	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A11	MSP-PD-MP-0081X	Rugleuning	Alle	Alle	1	X=0 voor blauw X=1 voor grijs
A13	MSP-PD-MP-00130	Arملهuning	Alle	Alle	2	Complete samenstelling

-  Item: verwijst naar het nummer in de *exploded views*
-  Artikelnummer: Gebruik dit nummer als referentie bij het bestellen
-  Omschrijving: Een korte uitleg over het artikel
-  Vanaf s/n | tot s/n: Geeft het eerste en laatste serienummer van de voorziening weer waarvoor dit artikel geschikt is.
-  Aantal: Geeft aan hoe vaak het artikel in de voorziening gebruikt wordt
-  Opmerkingen: Eventuele opmerkingen over het artikel

Opmerkingen/ aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Conformiteitsverklaring

EG-Verklaring van overeenstemming

(volgens de richtlijn medische hulpmiddelen)

Wij, MSP Medical Products B.V.
De Sonman 7
5066 GJ Moergestel
Nederland

Verklaren dat: Elektrisch verstelbare werk/trippestoel
Merknaam MSP Medical Products „Adam+“
Type: MP-ADP-SD-00XXX
Vanaf serienummer MPADPSD18001

 In overeenstemming is met de richtlijn 93-42-EEG (richtlijn medische apparatuur) en geclassificeerd als klasse 1

 De stoel is op veiligheid getest volgens:

- EN 10535
- EN12182

Opgesteld op 06-06-2018 te Moergestel, Nederland



L.J.M.G. Dhanpat
Medical Spare Parts B.V.

